

Manual de Instruções




olá, somos Mikatos®

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso antes de colocar o aparelho em funcionamento.



Estetoscópio Metalplastic Simples ou Duplo mikatos®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

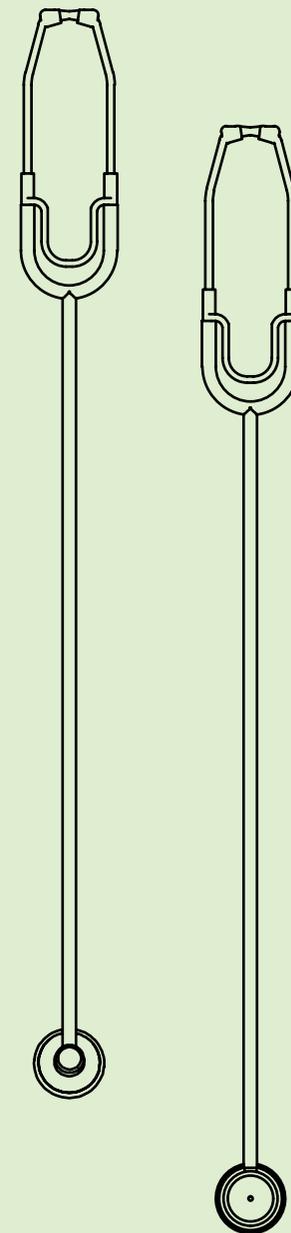

INDICAÇÃO DE USO



O **Estetoscópio Metalplastic Simples ou Duplo Mikatos®** é um instrumento que permite auscultar sons vasculares, cardíacos, respiratórios ou do trato digestório.

O aparelho é composto de conjunto auscultador com: tubo biauricular, tudo em formado “Y” (para condução do som) corpo do auscultador e olivas para encosto no ouvido do profissional. Todos esses componentes podem ser adquiridos separadamente para troca eventual.


Opera na frequência audível de 20 a 500 Hz (Hertz) e intensidade sonora de 30 dbA (Decibel na escala A).

Componentes do produto

Estetoscópio Auscultável em Aço Inox Missouri®

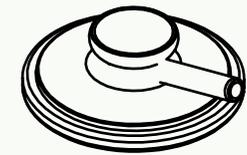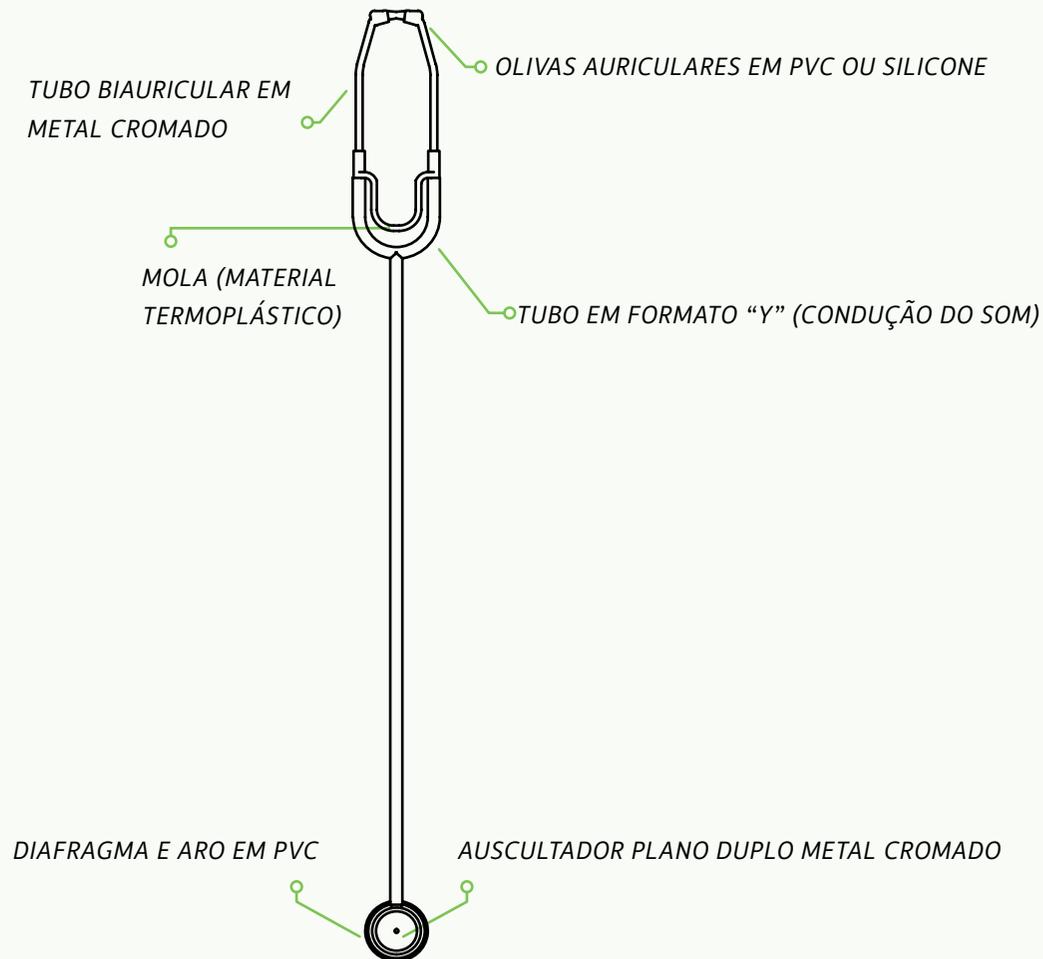

AUSCULTADOR
SIMPLES

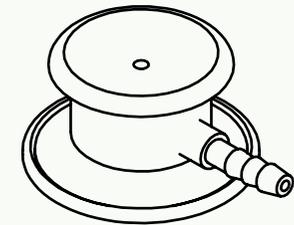

AUSCULTADOR
DUPLO

Procedimentos operacionais e instruções de uso;

Funcionamento:



- No momento em que o médico encosta no corpo do paciente, o som é amplificado e chega nas olivas através dos tubos biauriculares (hastes);
- Antes de colocar as olivas nos seus ouvidos, certificar-se que apontam para frente. Isso garante que os tubos auriculares irão se alinhar com seus canais auditivos, trazendo mais conforto e uma melhor transmissão de som;
- Se o encaixe das olivas não for confortável, ou a transmissão do som não estiver adequada, ajustar a fixação das olivas nos tubos biauriculares. Delicadamente aperte os tubos biauriculares juntos para aumentar a tensão e separe-os para diminuir a tensão;
- Quando estiver utilizando um **Estetoscópio Metalplastic Simples ou Duplo Mikatos®** você precisa abrir (ou indicar) o lado que você deseja usar - campânula ou diafragma - girando o auscultador;
- Se o diafragma estiver aberto, a campânula estará fechada, evitando sons vindo através da campânula e vice versa.
- Se você costuma carregar o seu **Estetoscópio Metalplastic Simples ou Duplo Mikatos®** no bolso ou se você não faz a sua limpeza com frequência, a sujeira pode se acumular e obstruir o caminho do som;
- para que isso não aconteça cuide e limpe do seu **Estetoscópio Metalplastic Simples ou Duplo Mikatos®** com frequência;
- Para o bom funcionamento do **Estetoscópio Metalplastic Simples ou Duplo Mikatos®** verificar-se a vedação de ar está adequada para que os sons corporais sejam transmitidos até os ouvidos do profissional de saúde assim, partes soltas no auscultador, tudo solto ou rachado ou olivas incorretamente ajustadas, podem impedir a vedação de ar;

EMBALAGEM CONTENTO

- Estetoscópio Metalplastic Plano Simples;
Opcional: Estetoscópio Duoscopic Metalplastic.
- Auscultador Plano Simples (Metalplastic);
Opcional: Auscultador Duplo (Metalplastic).
- Manual de Instruções com Certificado de Garantia;
- Embalagem: Caixa de Papelão Microondulado.

INSTRUÇÕES GERAIS

- A limpeza e desinfecção de produtos médicos servem para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para uma maior preservação dos produtos médico - hospitalares;
- A validade dos produtos é estipulada pelo desempenho correto e manuseio cuidadoso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Todos os componentes do **Estetoscópio Metalplastic Mikatos®** podem ser limpos usando-se um pano macio umedecido com água e sabão neutro, ou lenço de papel umedecido com Álcool Etílico Hidratado (70% puro);
- As olivas podem ser removidas dos tubos auriculares para uma limpeza completa;
- Para sua segurança e funcionalidade, certifique-se de que as olivas estão firmemente encaixadas nas hastes do Estetoscópio;
- No atendimento a cada paciente, o diafragma e o auscultador podem ser limpos com Álcool (70%), secando todas as peças após a limpeza, antes de usá-lo.

Orientações para cuidados e limpeza



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Fazer periodicamente uma limpeza de rotina você assegura a prolongar a vida do Estetoscópio;
- Evitar movimentos bruscos ou batidas no aparelho;
- Não é recomendado expor o **Estetoscópio Plastic Mikatos®** a temperaturas extremas;
- A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem trazer prejuízos ao profissional e ao paciente;
- Para preservar o aparelho contra deterioração, o mesmo deve ser guardado em local protegido do calor, da umidade e das intempéries atmosféricas;
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças ou animais;

Orientações para cuidados e limpeza



CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI, assegura ao proprietário do produto, garantia contra eventuais defeitos de fabrica pelo prazo de **01 ano** a contar da data da **Nota Fiscal** de compra do cliente.

Estão **cobertas** pela garantia, as pelas, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material.

A garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transportes entre domicílio e Assistência Técnica e outros que se façam necessárias ocorreão por conta do cliente.

Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP

CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO - ANTONIO CARLOS SIMÕES

CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1

REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - M.S: N° 80218930004

VALIDADE: INDETERMINADA

