

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA, assegura ao proprietário do produto garantia contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de **01 ano** a contar da data da **Nota Fiscal** de compra do cliente. Estão **cobertas** pela garantia, as peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material. A garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro. Eventuais despesas de transportes entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente.

Acessar o site **mikatos.com.br**, através de seu computador ou smartphone

Decodificar o QR Code ao lado:



1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO
LTDA

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

ESTRADA Kaiko N° 790 - GALPÃO 1 - CHACARA LIDIA - EMBU DAS ARTES/SP


CEP: 06843-455 - SAC - (11) 4781-8001

REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - 80218930010

VALIDADE: INDETERMINADA

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA

Imagens meramente ilustrativas

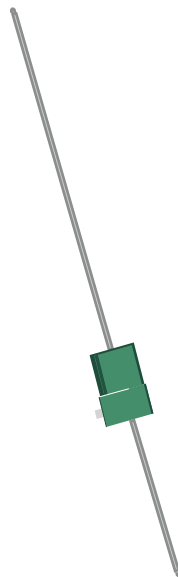

Guia de Intubação Mikatos®



Ler cuidadosamente as instruções de uso
antes de colocar o aparelho em funcionamento.

Rev01 08-26


APLICAÇÃO

A Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento onde o médico, com um Laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz o tubo na traquéia. O tubo endotraqueal será realizado para auxiliar na ventilação do paciente, pois possibilita que seja alcançado o funcionamento dos pulmões.

INSTRUÇÕES DE USO

- Introduzir totalmente o guia por dentro da sonda;
- Ajustar o botão na posição de uso encaixando-o na parte superior do tubo orofaríngeo (endotraqueal) através do parafuso de regulagem no botão;
- Moldar o tubo endotraqueal até obter a curvatura desejada conforme a anatomia do paciente;
- Introduzir o tubo cuidadosamente para uma intubação correta evitando danos e ferimentos ao paciente;
- O Guia de Intubação só deve ser utilizado por pessoas que tenham recebido treinamento e qualificação adequada;
- O **Guia de Intubação** só deve ser utilizado por pessoas que tenham recebido treinamento e qualificação adequada.

COMPONENTES

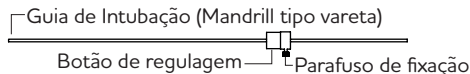

COMPRIMENTO TOTAL (mm)

- Modelo adulto: 425
- Modelo infantil: 300

CONTEÚDO EMBALAGEM

- 01– Guia de Intubação (Mandril tipo vareta) em cobre flexível cromado.
- 01– Botão em termoplástico
- 01– Manual de Instruções com Certificado de Garantia.
- 01– Embalagem plástica de acondicionamento.

Opcional: Guia de Intubação (Mandril tipo vareta) sem botão de regulagem.

INSTRUÇÕES GERAIS

– A limpeza e desinfecção de produtos médicos serve para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos mesmos. A validade dos produtos médicos é determinada pelo bom funcionamento e pelo manuseio cuidadoso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

– Para realizar os procedimentos de limpeza o Guia de Intubação (mandril) Mikatos® deverá ser totalmente desmontado para a remoção de qualquer resíduos existentes, realizando o procedimento com luvas de proteção (Látex) descartáveis.

A desinfecção de limpeza deve ser realizada com uma solução de Glutaraldeído a 2% e manter as peças totalmente imersas por um período de 30 minutos, após a limpeza, enxaguar as peças em Álcool Hidratado com 70% de pureza ou água estéril e deixar secar em ambiente livre de contaminações.

ESTERILIZAÇÃO

Para a esterilização os componentes devem ser colocados em autoclave a 134°C por (03) três minutos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

A limpeza, desinfecção e esterilização devem ser realizadas antes de cada utilização, conforme as instruções deste manual.

ARMAZENAMENTO

– Armazenar em local seco, protegido de calor, umidade e intempéries, sob temperatura de -20 °C a 60 °C e umidade relativa do ar de 10% a 90%, sem condensação.